

Glucoseo[®] fine

Blutzucker-Mess-System

Richtig Blutzucker messen

Vor dem Messen: Hände mit warmem Wasser gründlich waschen und gut abtrocknen.



1. Stechhilfe vorbereiten

- Neue Lanzette einlegen
- Stechhilfe spannen
- Einstechtiefe einstellen



2. Teststreifen einführen

- ...mit Pfeil nach oben und zum Gerät zeigend
- Gerät startet automatisch
- Teststreifen-Röhrchen umgehend wieder verschließen
- Teststreifen-Code wird automatisch angezeigt
- Mit Aufdruck auf Teststreifen-Röhrchen vergleichen
- Symbol zum Auftragen der Blutprobe erscheint



3. Blutprobe gewinnen

- Stechhilfe gegen eine Fingerbeere drücken
- Auslöser der Stechhilfe betätigen
- Finger leicht drücken - NICHT pressen!



4. Blutprobe auftragen

- Blutropfen an äußerstes Ende des Teststreifens heranführen
- Blut auftragen, bis Testfenster gefüllt ist (Signalton)
- Falls Blutprobe nicht ausreichend: NICHT nochmals Blut auftragen, sondern Vorgang mit NEUEM Teststreifen wiederholen!



5. Ergebnis ablesen

- Messung startet automatisch
- 5-Sekunden-Countdown
- Messergebnis wird angezeigt und automatisch gespeichert
- Messergebnis in Diabetiker-Tagebuch eintragen

